





**電動
ミニドリル
ドライバー**

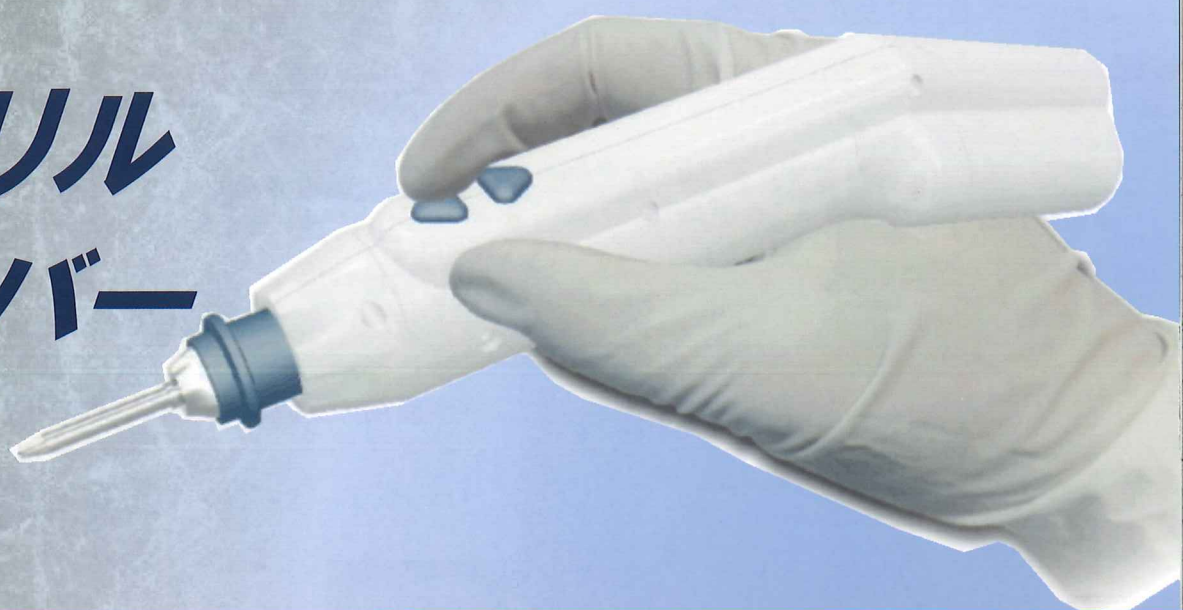

株式会社 **ベアー** メディック

■ 本体仕様

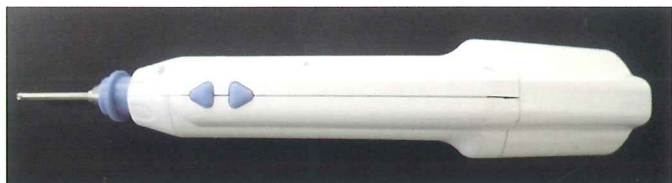

ビット

本体


バッテリー

● サイズ・重量

全長: 215mm(ドライバービット+本体+バッテリー)
190mm(本体+バッテリー)

重量: 本体 140g
バッテリー 65g

● スイッチ(正転/逆転ボタン)

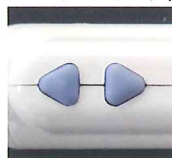

電動ミニドリルドライバーセット



本体セット

セット内容

- ・本体: SP-002-2M (初回のみ滅菌済)
- ・交換用ビット 2本 (未滅菌)
- ・予備用ドライバー 1本 (未滅菌)
(ハンドドライバー)
- ・バッテリー: SP-002-11M(DC3.0V) (滅菌済)



バッテリー
(滅菌済)

届出番号: 電動ドライバー……11B1X10014000L03
: ドライバービット……08B1X00003000017
: ハンドドライバー……08B1X00003000011

取扱説明

- 電動ドライバーの初回貸し出し時はEOG滅菌済です。
- バッテリーはEOG滅菌済です。 **※単回使用の為、再滅菌不可**
- 電動ドライバーの滅菌方法は専用の保管ケースに収納し必ずEOG滅菌にて処理をお願い致します。

お問い合わせは、株式会社ベアーメディックまたは各担当者まで



株式会社ベアーメディック

【本社工場】〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361
【東京営業所】〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
TEL: 03-3818-4041 (代) FAX: 03-3818-4042
その他の製品に関する情報はホームページをご覧ください。
<http://www.bearmedic.co.jp>