

血管縫合用内腔維持カテーテルモヤステント

Silicone Stent

(血管吻合用)




株式会社 ベアーメディック



■ シリコンステント (血管吻合用) 5パック / 1箱 (血管縫合用内腔維持カテーテルモヤステント)


カタログ番号	MS-0311
薬事承認番号	22700BZX00001000
JANコード	4544607408013
標準価格	¥35,000
1パック内容	長さ3mm×太さ0.3mm 長さ5mm×太さ0.3mm
	長さ3mm×太さ0.4mm 長さ5mm×太さ0.4mm
	長さ3mm×太さ0.5mm 長さ5mm×太さ0.5mm
	長さ3mm×太さ0.7mm 長さ5mm×太さ0.7mm
	長さ3mm×太さ0.9mm 長さ5mm×太さ0.9mm
	長さ3mm×太さ1.1mm 長さ5mm×太さ1.1mm

■ 手技

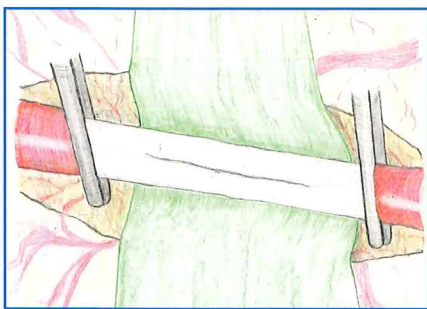


通常手技にてRecipient血管を遮断し、開口部を作成する。

1

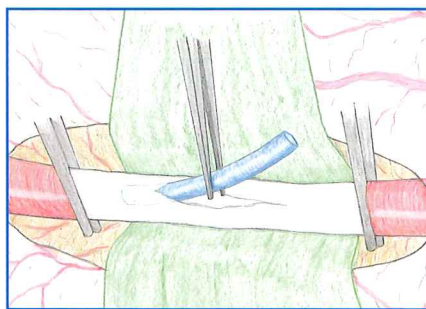


Recipient血管径の1/2~2/3程度の径のシリコンステントを選択し、シリコンステント中央部を鉗子で掴み、愛護的に血管へ挿入する。

2

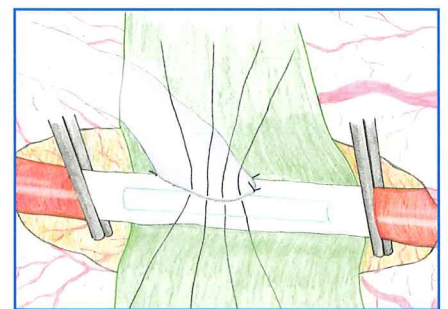


通常手技にてstay sutureをかけた後、片側を縫合し、反転したもう片側は縫合系をかけるだけで結紮は行わない。

3

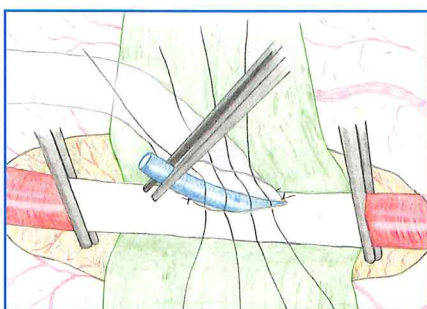

緩んでいる縫合糸と開口部の隙間からシリコンステントを端から愛護的に抜去する。

4

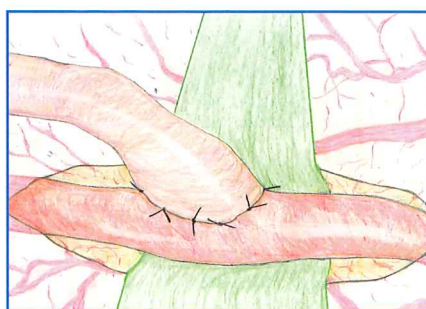

通常手技にて全ての縫合糸の結紮を行う。

5

 **株式会社ベアーメディック**

本工場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル

TEL.03-3818-4041(代) FAX.03-3818-4042

その他の商品に関する情報はホームページをご覧ください。

<http://www.bearmedic.co.jp/>

