

デュピュイトラン拘縮 コラゲナーゼ注射用チューブ (STチューブ法)



製品特長

拘縮索内へ正確に安全に
注入できます。

《2、2.2、2.5、2.7、3.0mmの深度へ対応》

手順① サイザーチューブ(12・12.5・13mm)で使用する針埋め込み式シリンジの針実長を確認します。



×



○



×



針にチューブを装着し、針先とチューブの長さが出ている事を確認して下さい。


手順② 注入深度を決定後チューブを選択します。
(エコー検査で適正深度を測定する事を推奨します。)



針長	チューブ長				
12mm	10mm	9.8mm	9.5mm	9.3mm	9mm
12.5mm	10.5mm	10.3mm	10mm	9.8mm	9.5mm
13mm	11mm	10.8mm	10.5mm	10.3mm	10mm
注入深度	2.0mm	2.2mm	2.5mm	2.7mm	3.0mm

注入深度** = 針長 - チューブ長*

手順③ "拘縮索に垂直に" 注入します。
撮子でチューブを保持することで注入が安定します。

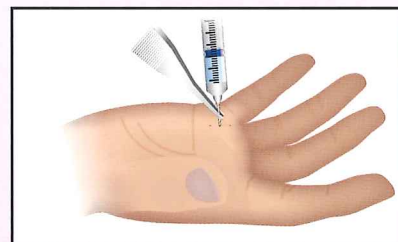

商品名 ST法チューブセット 商品コード TKST 0913 1箱/5セット 定価 4,750円



株式会社ベアーメディック

製造販売元
株式会社 ベアーメディック
〒113-0034
東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル
TEL:03-3818-4041 FAX:03-3818-4042
<http://www.bearmedic.co.jp>