


multi hand system

multi hand 2.0

multi hand 1.5

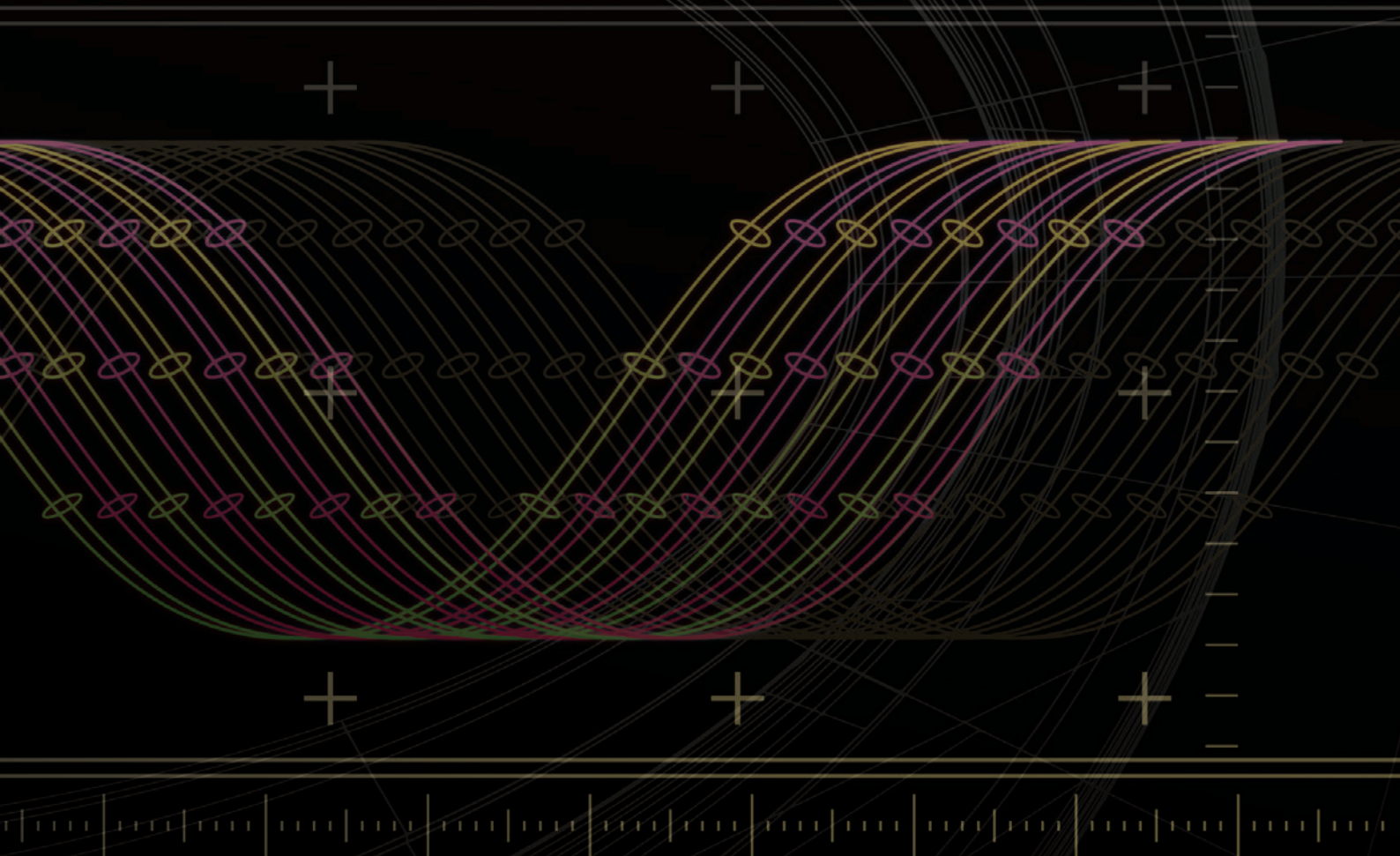

multi hand system

★特徴 1 スクリュー専用ケース (オートクレーブ滅菌可)



スクリュー専用単包滅菌ケースを採用しました。
ケース側面にカタログ番号、LOT 番号が記載されています。
これによりカタログ番号の確認や LOT 番号の管理がし易くなります。

術中スクリューを取り出す際はスクエアスクリューヘッドにドライバーを垂直に入れることで
勘合するセルフホールディング方式により、スクリューを容易に取り出すことができます。

※スクリューケースには製品番号と LOT 番号が刻印されています。ご使用後は刻印を確認して使用後管理を行って下さい。

★特徴 2 カラーによる識別

multi hand system は使用するプレート・スクリューが色分けされております。1.5 はピンク色のインプラントでピンク色のスクリュードライバーが適応され、2.0 はライム色のインプラントでライム色のスクリュードライバーが適応されます。
また2.0mm キャニュレイテッドスクリューはブルーであり、スクリュードライバーはブルーの中空スクリュードライバーにより挿入可能です。

multi hand 1.5

φ1.5mm ソリッドスクリュー対応

multi hand 2.0

φ2.0mm ソリッドスクリュー対応

φ2.0mm キャニュレイテッドスクリュー対応

★特徴 3 Made in Japan

インプラントおよび手術器械は国内で製造しております。
手術器械は複雑な構造のインストゥルメントは極力省き、シンプルな手術器械をご用意しました。



プレートホルダーは逆バネ構造により、
プレートを保持します。

専用デプスゲージは目盛り前方部にあるライン部分と
目盛り後方部の 2 箇所で見測することが出来ます。

multi hand 1.5

1.5 Plate Size Variation 厚さ：0.6mm

型番	製品名
S0613	1.5mm用ストレートプレート 16 穴
T0602	1.5mm用 T 型プレート 3-8 穴
Y0604	1.5mm用 Y 型プレート 8 穴
SQM0603	1.5mm用マトリックスプレート 2×4 穴
C1001L	1.5mm用コンディラープレート L 5 穴
T0609	1.5mm用 T 型プレート 2-7 穴

型番	製品名
H0601	1.5mm用フックプレート
T0607	1.5mm用 T 型プレート 3-13 穴
Y0612	1.5mm用 Y 型プレート 16 穴
SQM0605	1.5mm用マトリックスプレート 2×6 穴
C1001R	1.5mm用コンディラープレート R 5 穴
T0614	1.5mm用 T 型プレート 2-12 穴

1.5mm Solid Screw Variation (スクエアヘッド)


適合ドリル 型番 HSD1127-ST φ1.1mmソリッドドリル
スクリュー長はデプスゲージの数値に1mmプラスサイズを推奨

型番	製品名
SS1504	ソリッドスクリューφ1.5×4mm
SS1505	ソリッドスクリューφ1.5×5mm
SS1506	ソリッドスクリューφ1.5×6mm
SS1507	ソリッドスクリューφ1.5×7mm
SS1508	ソリッドスクリューφ1.5×8mm
SS1509	ソリッドスクリューφ1.5×9mm
SS1510	ソリッドスクリューφ1.5×10mm
SS1511	ソリッドスクリューφ1.5×11mm
SS1512	ソリッドスクリューφ1.5×12mm
SS1513	ソリッドスクリューφ1.5×13mm
SS1514	ソリッドスクリューφ1.5×14mm

型番	製品名
SS1515	ソリッドスクリューφ1.5×15mm
SS1516	ソリッドスクリューφ1.5×16mm
SS1517	ソリッドスクリューφ1.5×17mm
SS1518	ソリッドスクリューφ1.5×18mm
SS1519	ソリッドスクリューφ1.5×19mm
SS1520	ソリッドスクリューφ1.5×20mm
SS1521	ソリッドスクリューφ1.5×21mm
SS1522	ソリッドスクリューφ1.5×22mm
SS1523	ソリッドスクリューφ1.5×23mm
SS1524	ソリッドスクリューφ1.5×24mm

2.0 Plate Size Variation厚さ：1.0mm

型番	製品名
S1013	2.0mm用ストレートプレート 16 穴
	

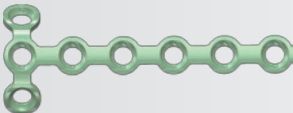型番	製品名
T1002	2.0mm用 T型プレート 3-8 穴
	


型番	製品名
T1007	2.0mm用 T型プレート 3-13 穴
	


型番	製品名
Y1003	2.0mm用 Y型プレート 8 穴
	

型番	製品名
Y1007	2.0mm用 Y型プレート 12 穴
	

型番	製品名
L1001L	2.0mm用 L型プレート L 6 穴
	

型番	製品名
L1001R	2.0mm用 L型プレート R 6 穴
	

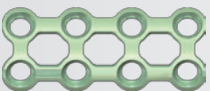型番	製品名
SQM1003	2.0mm用マトリックスプレート 2×4 穴
	

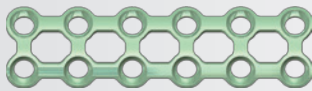型番	製品名
SQM1005	2.0mm用マトリックスプレート 2×6 穴
	


型番	製品名
T1009	2.0mm用 T型プレート 2-7 穴
	

型番	製品名
T1014	2.0mm用 T型プレート 2-12 穴
	

型番	製品名
C1003L	2.0mm用コンディラープレート L 6 穴
 ※コンディラープレートをご使用の際はφ1.3mm程度の K ワイヤーで下穴を開けてバー部分を挿入して下さい。	

型番	製品名
C1003R	2.0mm用コンディラープレート R 6 穴
 ※コンディラープレートをご使用の際はφ1.3mm程度の K ワイヤーで下穴を開けてバー部分を挿入して下さい。	

2.0mm Solid Screw Variation (スクエアヘッド)

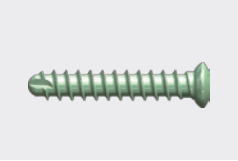

適合ドリル 型番 HSD1627-ST φ1.6mmソリッドドリル
スクリュー長はデプスゲージの数値に1mmプラスサイズを推奨

型番	製品名
SS2004	ソリッドスクリューφ2.0×4mm
SS2005	ソリッドスクリューφ2.0×5mm
SS2006	ソリッドスクリューφ2.0×6mm
SS2007	ソリッドスクリューφ2.0×7mm
SS2008	ソリッドスクリューφ2.0×8mm
SS2009	ソリッドスクリューφ2.0×9mm
SS2010	ソリッドスクリューφ2.0×10mm
SS2011	ソリッドスクリューφ2.0×11mm
SS2012	ソリッドスクリューφ2.0×12mm
SS2013	ソリッドスクリューφ2.0×13mm
SS2014	ソリッドスクリューφ2.0×14mm

型番	製品名
SS2015	ソリッドスクリューφ2.0×15mm
SS2016	ソリッドスクリューφ2.0×16mm
SS2017	ソリッドスクリューφ2.0×17mm
SS2018	ソリッドスクリューφ2.0×18mm
SS2019	ソリッドスクリューφ2.0×19mm
SS2020	ソリッドスクリューφ2.0×20mm
SS2021	ソリッドスクリューφ2.0×21mm
SS2022	ソリッドスクリューφ2.0×22mm
SS2023	ソリッドスクリューφ2.0×23mm
SS2024	ソリッドスクリューφ2.0×24mm

2.0mm Cannulated Screw Variation (スクエアヘッド)




適合ドリル 型番 HCD1725-ST φ1.7mm中空ドリル
型番 HSD1727-ST φ1.7mmソリッドドリル
適合ガイドピン 型番 HGP08100-ST φ0.8mmガイドピン
スクリュー長はデプスゲージの数値に1mmプラスサイズを推奨

型番	製品名
CS2004	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×4mm
CS2005	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×5mm
CS2006	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×6mm
CS2007	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×7mm
CS2008	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×8mm
CS2009	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×9mm
CS2010	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×10mm
CS2011	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×11mm
CS2012	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×12mm

型番	製品名
CS2013	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×13mm
CS2014	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×14mm
CS2015	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×15mm
CS2016	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×16mm
CS2017	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×17mm
CS2018	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×18mm
CS2019	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×19mm
CS2020	キャニュレイテッドスクリューφ2.0×20mm

multi hand system

INSTRUMENTS

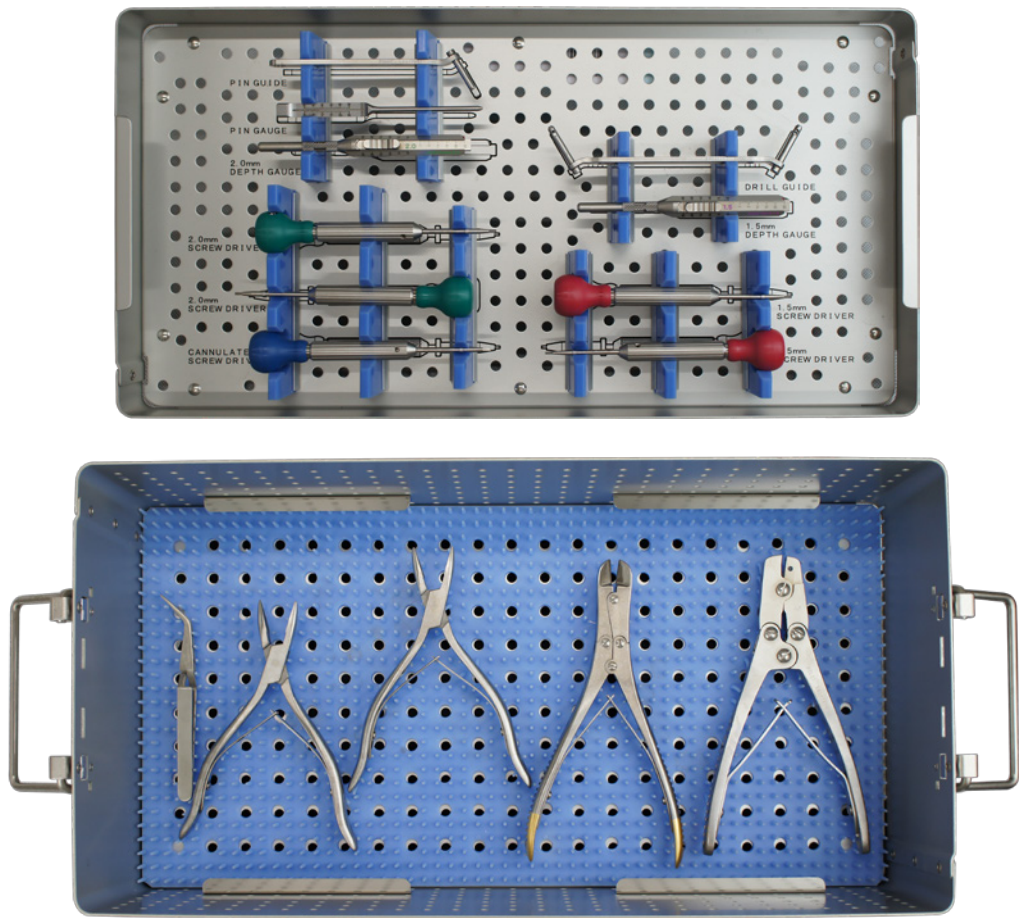


製品名	製品番号	セット数量
φ1.5 mm用 ソリッドスクリュードライバー	SS15D	2
φ2.0 mm用 ソリッドスクリュードライバー	SS20D	2
φ2.0 mm用 中空スクリュードライバー	CS20D	1
φ1.5 mmスクリュー用 デプスゲージ	DPG15	1
φ2.0 mmスクリュー用 デプスゲージ	DPG20	1
プレートカッター L	PCL01	1
プレートカッター S	PCS01	1
ドリルガイド	DG01	1
ガイドピンガイド	PGU01	1
ガイドピンゲージ	PGA01	1
プレートホルダー	PH01	1
プレートベンダー	PB01	2
器械・インプラントケース	MHSC	1
合計		16

注意事項



プレートカッター L をご使用の際は術者の左手でプレートを水平に保持した状態でカットして下さい。
切断位置はカッターの刃の中心部分で行って下さい。(根元部分でカットすると破断したプレートがカッター内部に残る可能性があります。) 専用プレートカッターを使用することで切った断面がホールドされる構造になっております。これにより切ったプレート断端が術中に飛んで紛失する可能性が低減されます。

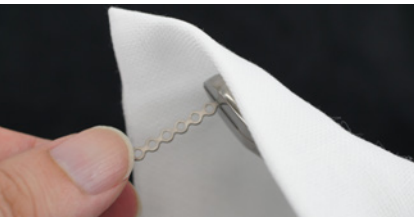

プレートカッター S を使用し、プレートをカットする場合にプレートの破片が弾け飛ぶことがあります。必ずガーゼ等を用いてカバーし破片が飛ばない状況下でカットして下さい。

スクリュードライバーはスクリューに対して垂直に押し込んで下さい。

(垂直に押し込まないとスクリューを斜めにホールドすることがあります。)



プレートをベンディングする際は極端な曲げ、繰り返しの曲げ、曲げ戻しは行わないで下さい。
スクリューを選択する際はデプスゲージで示された値に1mmプラスした長さのスクリューをご使用下さい。
スクリューをピックアップする際には、スクリューケースを軽く押さえながら取り出してください。(スクリューとケースが一緒に持ち上がることがあります)

スクリューはスクリュー径に対応したサイズのドリルにて下穴を作成して下さい。

- 1.5mm Solid Screw (型番 SS15※※)・・・適合ドリル HSD1127-ST φ1.1mmソリッドドリル
- 2.0mm Solid Screw (型番 SS20※※)・・・適合ドリル HSD1627-ST φ1.6mmソリッドドリル
- 2.0mm Cannulated Screw (型番 CS20※※)・・・適合ドリル HSD1727-ST φ1.7mmソリッドドリル
- ・・・適合ドリル HCD1725-ST φ1.7mm中空ドリル(ガイドピン使用時)
- ・・・適合ガイドピン HGP08100-ST φ0.8mm ガイドピン

※ドリル、ガイドピンは滅菌・単回使用品になります。

マルチハンドシステム 2.0/1.5 禁忌・禁止事項

- ・再使用禁止
- ・プレートの強度が低下し、破損につながるおそれがあるため、極端な曲げ、繰り返しの曲げ及び曲げ戻しは行わないこと
- ・金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと
- ・他社製品（指定製品以外）、専用以外の器械器具と併用しないこと
- ・骨粗鬆症あるいは骨形成、骨量・骨質が不十分な場合〔十分な臨床効果が得られない場合がある〕
- ・認知症や精神疾患、アルコール中毒症等で術後、医師の指示に従えない場合〔医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、不具合や有害事象の発現の可能性がある〕

販売名：マルチハンドシステム手術器械セット
届出番号：08B1X00003000032

販売名：マルチハンドシステム単回使用整形外科用バー
認証番号：301AKBZX00005000

販売名：マルチハンドシステム2.0/1.5
承認番号：23100BZX00100000

代理店



販売元：
株式会社ステラ医療企画
千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9
TEL：043-350-0320
<http://www.stellamed.co.jp>



製造販売元：
株式会社ベアーメディック
製造工場：
茨城県久慈郡大子町大子 1361
TEL：03-3818-4041