




BEAR PASSThrough2 Next

ベアパッスル2 ネクスト



 **株式会社ベアーメディック**

ループ形状のワイヤー

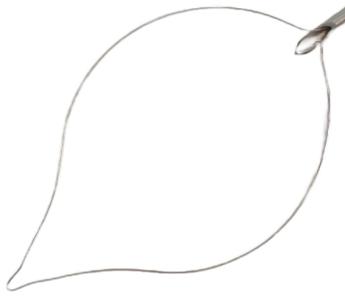

より細く
より安全に


傷をより小さくする為
18 ゲージに設計



日本人の体格に合わせた
シャフト長の設計
7 cm

腹腔内から糸の取出しへ
使用目的は吊り上げからポート創への
閉創まで幅広く使用可能

φ13.5 φ11.0 φ9.5 φ6.5
(各サイズ外径mm)

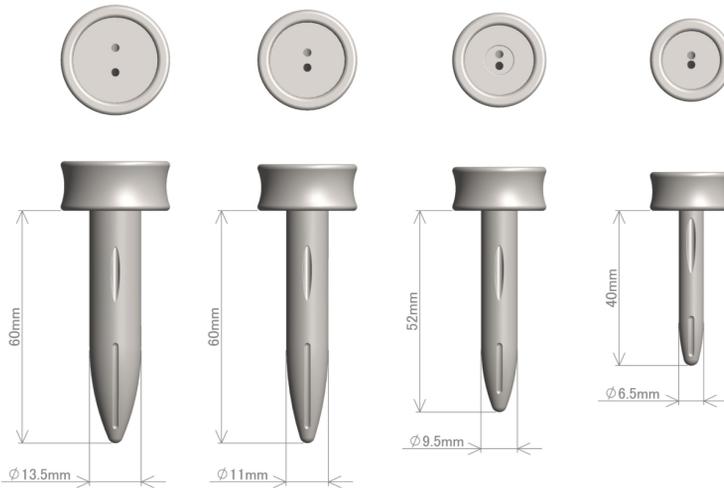


高さ調整リング



調整リング 7 mm厚

(調整リングをガイドに取付)
腹壁の厚さに対して筋膜周辺部への
穿刺位置を調整

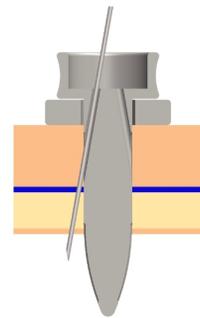


製品詳細


製品名	製品番号	希望小売価格(税抜)	入数	JANコード
ベアパッスル 2 ネクスト	BEAR-PN-2310	¥18,000	5 本/箱	4544607464866
販売名	ベアパッスル	*滅菌済デバイス製品	医療機器届出番号	08B1X00003000041
製品名	製品番号	希望小売価格(税抜)	入数	JANコード
クロージャーガイドφ12mm	BCG-SET	¥79,800	1 セット(リング付)	4544607478498
クロージャーガイドφ11mm	8M-BCG-SET	¥89,800	1 セット(リング付)	4544607481313
クロージャーガイドφ8mm	8S-BCG-SET	¥89,800	1セット(リング付)	4544607478535
クロージャーガイドφ5mm	5S-BCG-GUIDE	¥73,000	1 本(リングなし)	4544607479167
販売名	Bear クロージャーガイド	*未滅菌リユース製品	医療機器届出番号	08B1X00003000043

ベアパスル2ネクスト 使用法 について


1 針基を持って
穿刺する

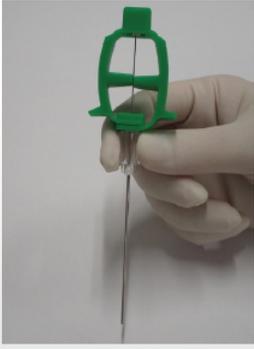

2 ループワイヤーが
収納された状態

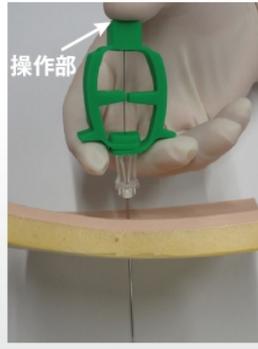

3 操作部を押して体腔内
でループワイヤーを出す

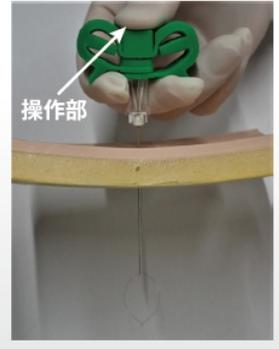


※操作部を押す際は
真っ直ぐ慎重に
押して下さい。

4 ループワイヤーに
縫合糸を通す



※対象の
縫合糸サイズ
2-0、3-0

5 操作部を離して、
縫合糸をつかむ

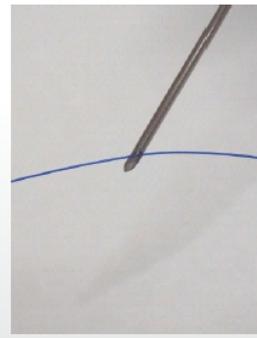

6 縫合糸を体外へ
引き出す




7 操作部を押して
ループワイヤーを出し、
縫合糸を引き抜く




※外針先から
ループワイヤーを
完全に出した状態で
縫合糸を外して
ください


ベアパスル2ネクストを用いたクロージャーガイド使用方法について

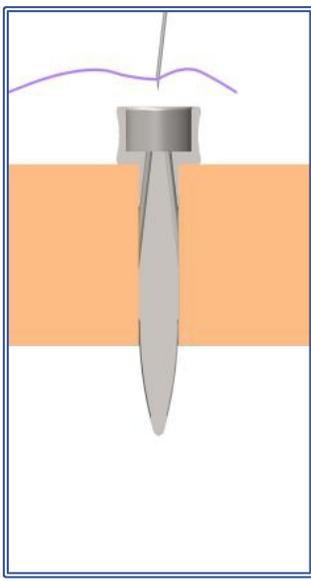


1)ベアパスル2の先端に
縫合糸を装着する
*出来るだけ糸のテール(端)を
掴むと腹腔内で糸が取り易くなります

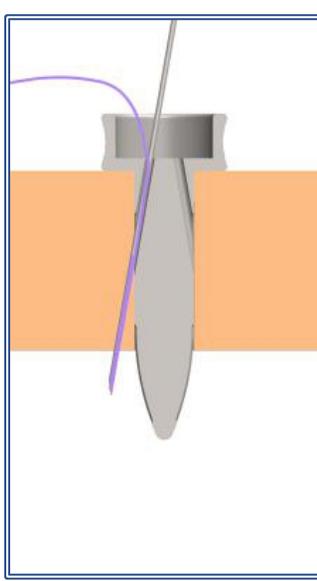


2)装着したベアパスル2
をガイドの片方の穴から
腹腔内に向けて挿入する

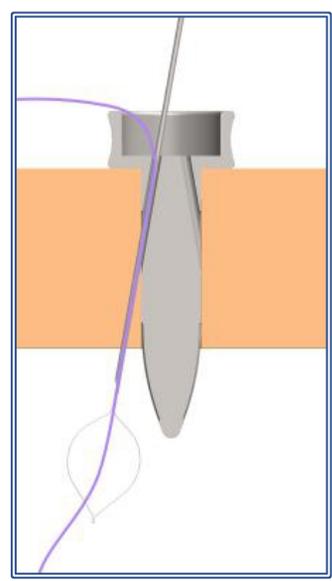


3) 腹腔内でループを
広げて装着した縫合糸を
リリースする
*対象の縫合糸サイズは 2-0 から1号
までのブレード糸が対象となります。

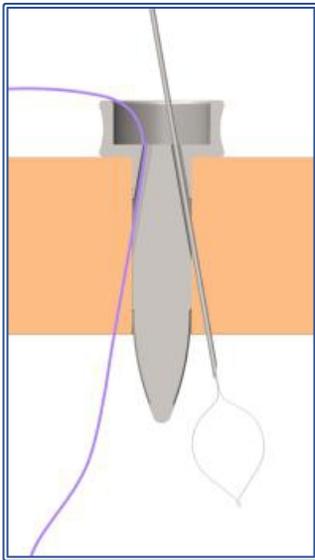


4)ガイドのもう片方の
穴から腹腔内に向けて
挿入しループを広げる

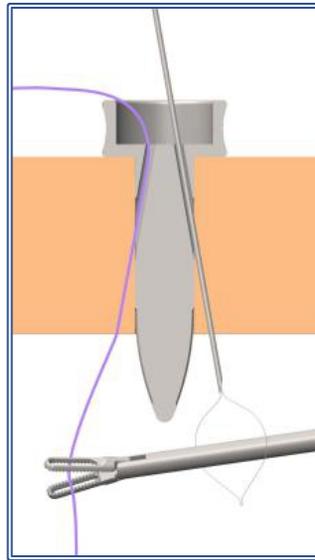


5)腹腔内で広げたループ
に鉗子を通しリリース
した縫合糸を把持する

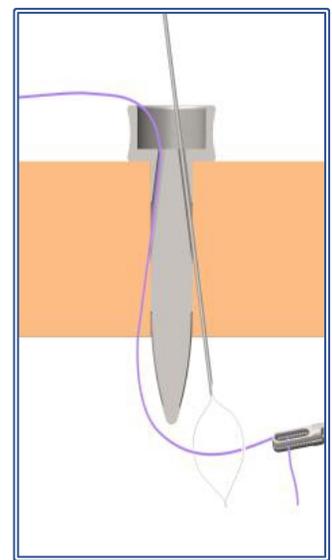

6)鉗子にて掴んだ縫合糸を
ループに通すよう誘導し
再度ループに収納する

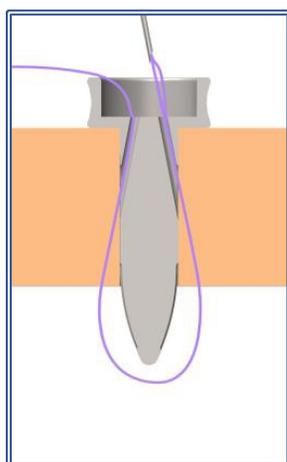

7)把持した縫合糸を
腹腔外に取り出す

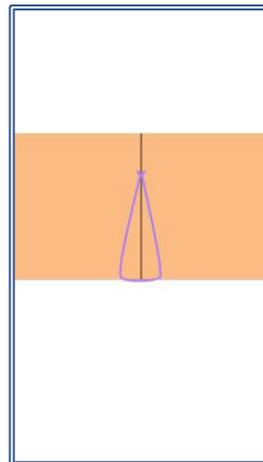

8)クロージャーガイドを
腹壁から抜き結紮を行う